

Mise en place du T-RING FLEX

1. Enfilez le T-RING sur un doigt ou un orteil.
2. Procédez aux soins dès que le saignement s'est arrêté. *



3. En cas de lambeaux importants et de déformations, étirez le T-RING pour agrandir l'ouverture et pouvoir ainsi le placer au-delà de la plaie.



- * Ne pas enfiler s'il existe un risque d'aggraver les lésions tissulaires.
- * Le T-RING ne doit pas rester au doigt ou à l'orteil plus de 90 minutes.
- * Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Retrait du T-RING FLEX

Coupez le T-RING FLEX le long du côté en caoutchouc.

